

Nagradna igra „Dobar tim“
prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

Nagradna igra „Dobar tim“

**Prikaz koraka za izradu izvještaja
o regulaciji glukoze**

Nagrada igra „Dobar tim“
prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

1. Stranica za izradu izvještaja o regulaciji glukoze	3
2. Registracija ili prijava	3
3. Otvaranje korisničkog računa	4
4. Potvrda adrese e-pošte	4
5. Odabir načina pohrane	5
6. Upis dodatnih podataka	6
7. Preuzimanje podataka iz glukometra	6
7.1 Instalacija aplikacije Results Downloader	7
7.2 Potvrda preuzimanja datoteke	8
7.3 Povezivanje glukometra	9
7.4 Odabir načina povezivanja glukometra	9
7.5 Upute o načinu povezivanja	10
7.6 Potvrda odabira	10
7.7 Konačna potvrda preuzimanja	11
8. Izrada i slanje izvještaja	11
8.1 Odabir razdoblja od 14 dana	12
8.2 Generiranje izvještaja	12
8.3 Slanje izvještaja	13

Nagrada igra „Dobar tim“ prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

Za ulazak u nagradno izvlačenje potrebno je poslati izvještaj o dobroj regulaciji glukoze. U nastavku su prikazane upute o načinu dobivanja izvještaja.

1. Stranica za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

U tražilicu upišite glucocontro.online i pritiskom na nju otvorite mrežnu stranicu.

Navedeni software nije potrebno preuzeti na osobno računalo već se njime može koristiti izravno na mreži.

2. Registracija ili prijava

Ako nemate već prethodno otvoren korisnički račun za aplikacije GlucoContro ili Contour Diabetes, odaberite „Registriraj se“.

Ako imate već postojeći korisnički račun prijavite se svojim podacima te nastavite na korak 7.

Prijavite se

Korisnik Zdravstveni djelatnik

Contour Za prijavu na svoj račun koristite podatke za Contour Cloud.

Adresa e-pošte

Unesite adresu e-pošte

Lozinka Zaboravili ste lozinku?

Unesite lozinku

Zapamti me

Prijava Nemate korisnički račun? **Registriraj se**

Nagrada igra „Dobar tim“ prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

3. Otvaranje korisničkog računa

Upišite tražene podatke u predviđena polja i stisnite „Registriraj se“

4. Potvrda adrese e-pošte

Nakon registracije korisničkog računa provjerite pristiglu e-poštu u svojem sandučiću na koju će stići poruka za potvrdu vaše adrese e-pošte. Nakon pritiska


Nagrada igra „Dobar tim“ prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

na ikonu „Potvrdi moj račun“ vratite se na stranicu GlucoContro i kliknite Nastavi.



5. Odabir načina pohrane

Odaberite na koji način želite pohraniti podatke. Pohranjivanje podataka na Centralnoj pohrani dostupno je svima. Za pohranu na Google Drive-e potrebno je imati valjanju Gmail adresu. Nakon odabira Centralne pohrane ili pohrane na Google Drive-u spremite svoj odabir pritiskom na „Odaberite vrstu pohrane“.

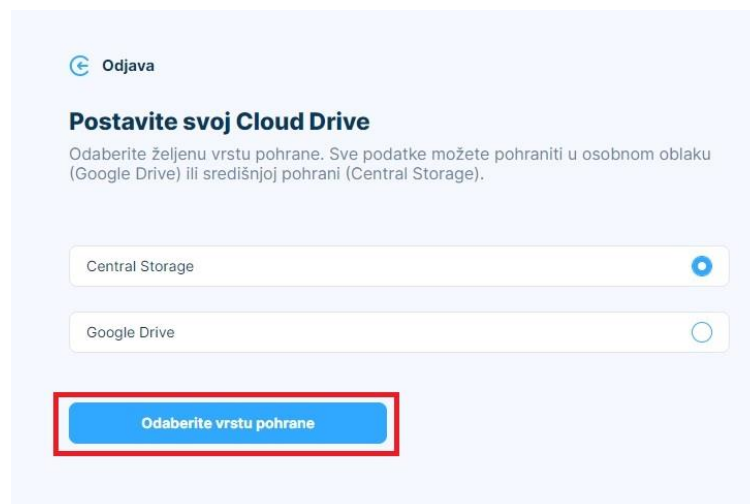

Nagrada igra „Dobar tim“ prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

6. Upis dodatnih podataka

Kao dio otvaranja korisničkog računa upišite tražene osobne podatke i pritisnite „Potvrdi“.

Unesite osobne podatke

Spol
 Žensko Muško

Tip šećerne bolesti

Vrsta terapije

Težina (kg)

Visina (cm)

Marketinške Suglasnosti
Želio bih primiti obavijesti o novostima, događajima, proizvodima i ponudama društva Ascensia i povezanih društava kako je dalje objašnjeno u [Članku o privatnosti](#). Molim kontaktirajte me:
 Telefon
 Poštanska adresa
 E-pošta
 SMS

Osetljivi Podaci i Profiliranje
 Označavanjem ove kućice izričito pristajem na to da moje osjetljive osobne podatke tvrtka Ascensia i njene podružnice koriste u marketinške svrhe, uključujući profiliranje i (npr. za razvoj svojih proizvoda i usluga u skladu s mojim potrebama).


Potvrdi

7. Preuzimanje podataka iz glukometra

Nakon otvaranja korisničkog računa prikazat će vam se početna stranica programa GlucoContro (Moji rezultati). U gornjem lijevom kutu stranice

Nagrada igra „Dobar tim“ prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

pritisnite ikonu „Preuzmi podatke s glukometra“.

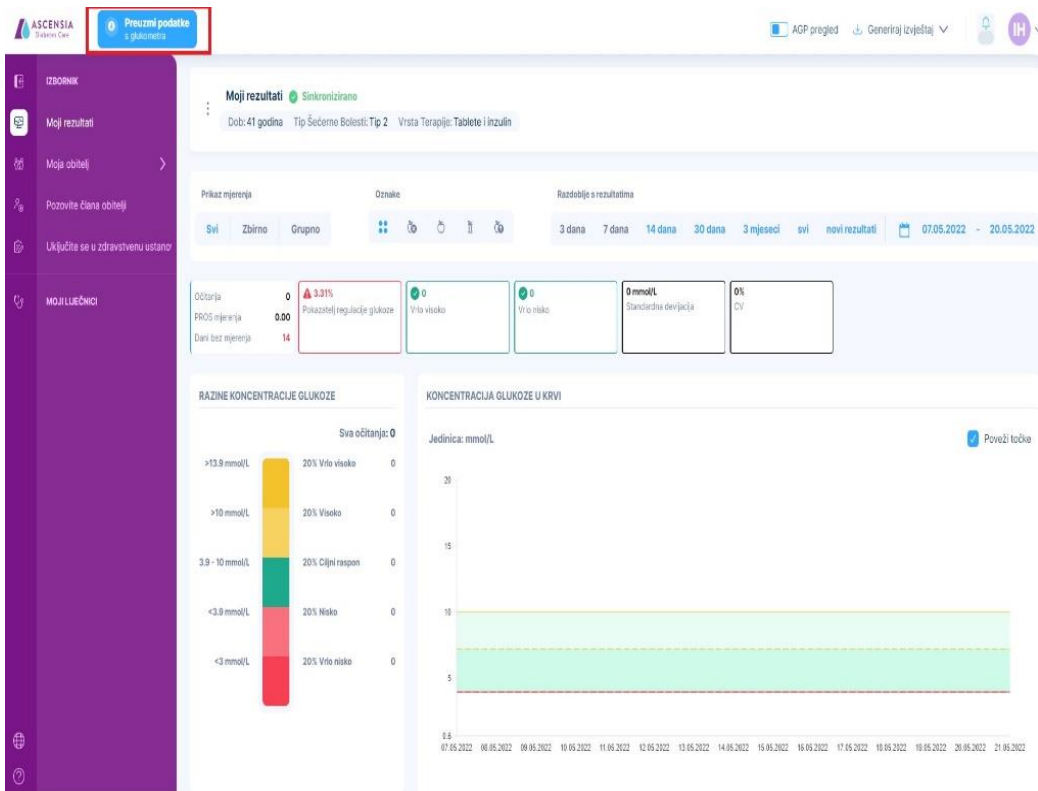

7.1 Instalacija aplikacije Results Downloader

Prilikom prvog korištenja programa GlucoContro, za potrebe preuzimanja podataka s glukometra potrebno je preuzeti aplikaciju Results Downloader.


Nagrada igra „Dobar tim“ prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

Kliknite na ikonu „Instalirajte aplikaciju Results Downloader“.



7.2 Potvrda preuzimanja datoteke

Prije pokretanja instalacije potrebno je dati odobrenje za otvaranje datoteke pritiskom na ikonu „Otvori“.

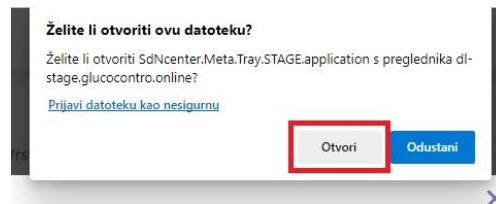

Preuzmite podatke s glukometra


Instaliranje aplikacije Results Downloader
Slijedite upute na zaslону i odobrite instalaciju.



Čeka se završetak instalacije upravljačkih programa ...

Nagrada igra „Dobar tim“
prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

Nakon toga će započeti instalacija aplikacije Results Downloader.

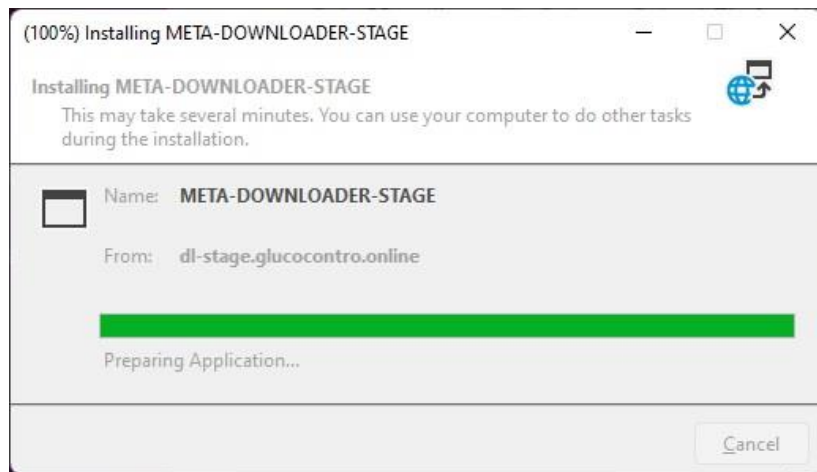


7.3 Povezivanje glukometra

Nakon uspješne instalacije aplikacije Results Downloader pritiskom na ikonu „Preuzmi podatke“ pokreće se povezivanje glukometra koje je potrebno za preuzimanje podataka.



7.4 Odabir načina povezivanja glukometra

Nagrada igra „Dobar tim“
prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze
Odaberite način na koji želite povezati GlucoContro s vašim
glukometrom. Glukometre Contour Next i Contour Next One možete
povezati bluetoothom ili micro USB kabelom.

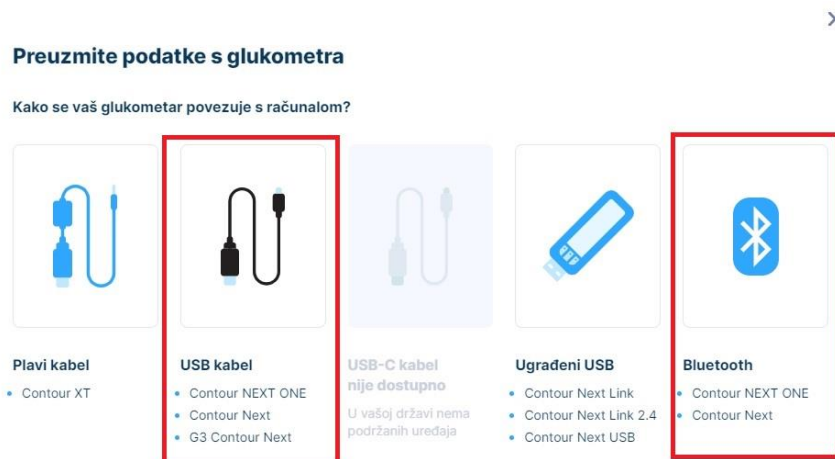

7.5 Upute o načinu povezivanja


Ovisno o odabranom načinu povezivanja slijedite upute koje će se prikazati na zaslону i pritisnite dalje.



7.6 Potvrda odabira


Nagrada igra „Dobar tim“ prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

Nakon što prvi put spojite glukometar pojaviti će se prozor za potvrdu unosa očitavanja, potvrdite pritiskom na tipku „Da“.

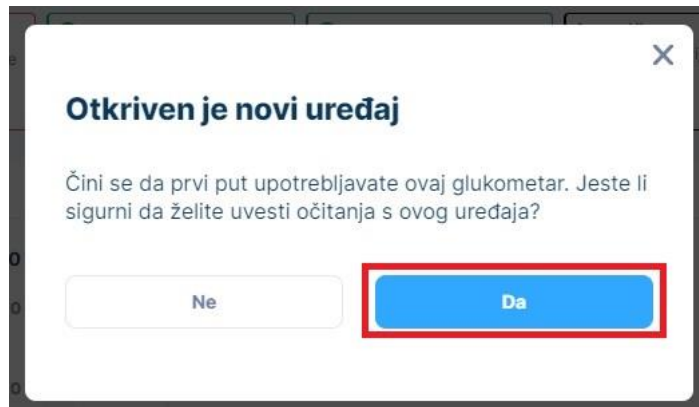

7.7 Konačna potvrda preuzimanja

Nakon uspješnog povezivanja i pripreme podataka potvrdite preuzimanje podataka pritiskom na tipku „Preuzmi podatke“.

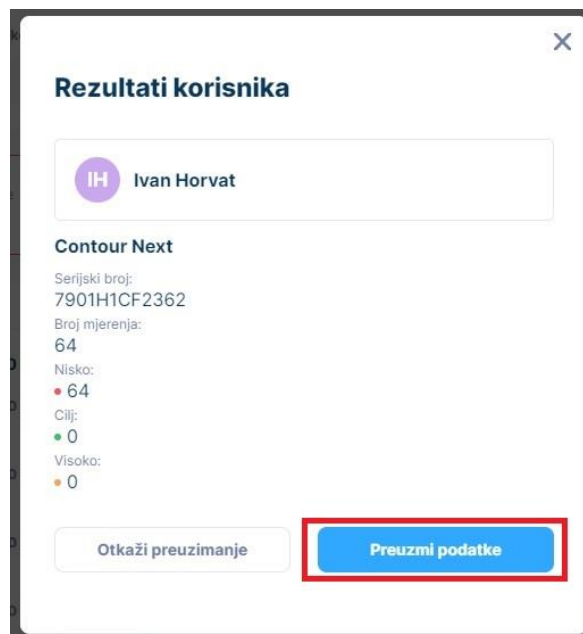


8. Izrada i slanje izvještaja

Nagradna igra „Dobar tim“
prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

8.1 Odabir razdoblja od 14 dana


U polju „Razdoblje s rezultatima“ odaberite razdoblje od 14 dana. GlucoContro će automatski prikazati 14 dana od posljednjeg zabilježenog mjerenja. Ako unutar posljednjih 14 dana postoji više od 4 dana bez mjerenja u kalendaru odaberite razdoblje koji zadovoljava zahtjeve nagradne igre.

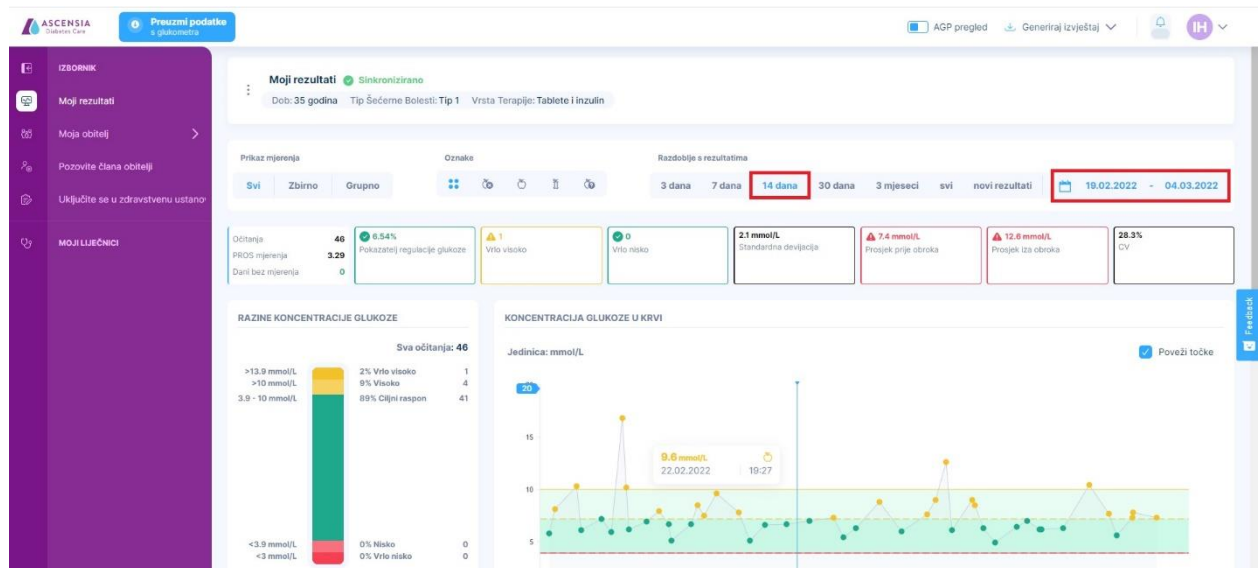

8.2 Generiranje izvještaja

U gornjem desnom kutu pritisnite na „Generiraj izvještaje“ i u padajućem izborniku odaberite „Standardni izvještaj nadzorne ploče“.

Nagradna igra „Dobar tim“ prikaz koraka za izradu izvještaja o regulaciji glukoze

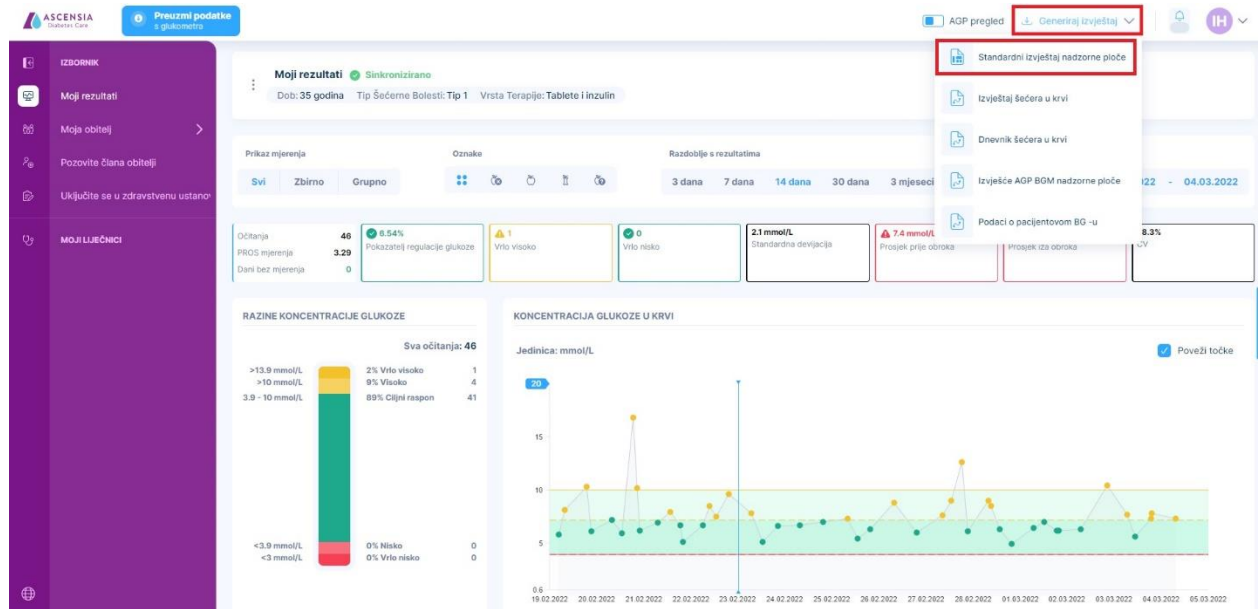

8.3 Slanje izvještaja

Spremite izvještaj u obliku PDF-a na vaše računalo i pošaljite ga na adresu dobartim@medilabone.com zajedno s Vašim imenom, prezimenom, adresom i brojem telefona.

